

# Préparation du médicament

## Écrase-comprimés Tookan®

L'écrase-comprimés Tookan® permet de réduire les comprimés en une fine poudre, **sans risque de troubles musculo-squelettiques**. Le broyage s'effectue du bout des doigts, sans effort ni à-coups.

Grâce à ses sachets, le Tookan® permet d'**éviter les contaminations croisées ainsi que l'inhalation de particules médicamenteuses**.

L'hygiène est donc totalement respectée !



Hygène



Ergonomie

### Points forts

- ▶ Broyage sans effort
- ▶ Facile d'utilisation
- ▶ Stockage des sachets dans l'appareil
- ▶ Matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers

# Écrase-comprimés Tookan®

## Caractéristiques techniques

### Écrase-comprimés Tookan®

- ▶ Base en tôle acier peinte époxy
- ▶ Poignée en polyamide
- ▶ Mâchoire en aluminium anodisé
- ▶ Axes en inox
- ▶ Poids : 1,4 kg

### Sachets pour écrase-comprimés

- ▶ Polyéthylène basse densité transparent
- ▶ Épaisseur : 180/200 µm
- ▶ Respectueux de l'environnement



Désignation

Dimensions (en mm)

Référence

Écrase-comprimés manuel Tookan®

L. 265 x P. 75 x H. 90

NA00017\_V02

1000 sachets universels pour écrase-comprimés

L. 50 x H. 100

NA00011.01


## Utilisation



1 Prenez un sachet rangé dans le bac de stockage.



2 Placez les médicaments dans le sachet puis repliez-le.

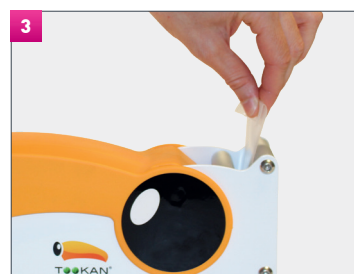

3 Insérez le sachet dans la mâchoire du broyeur.



4 Donnez quelques pressions sur la poignée, du bout des doigts, sans lâcher le sachet.



5 Récupérez les médicaments réduits en fine poudre.

Visionnez-moi

