

Schritt für Schritt Anleitung zum mahlen von Medikamenten mit dem Severo professionelle Tablettenmühle

Befolgen Sie dieses empfohlene Zerkleinerungsprotokoll, um sich nicht ungewollt Medikamentenstaub auszusetzen.
Follow this recommended grinding protocol to avoid unwanted exposure to medication dust.
Suivez ce protocole de broyage recommandé pour éviter une exposition indésirable à de la poudre médicamenteuse.
Siga este protocolo de molido para evitar una exposición no deseada a polvo de medicamento.

Um das Risiko einer Exposition und Kreuzkontamination zu vermeiden, befolgen Sie bitte das unten aufgeführte empfohlene Protokoll. Alternativ können Sie sich das folgende Tutorial online unten ansehen: www.severo.nl/demovideo.



1 Öffnen Sie den Severo durch auf den grauen Taste zu drücken. Füllen Sie den Mörserbecher bis zur ersten Markierung und legen Sie eine SeveroRondel zentriert auf den Becher.



2 Setzen Sie den Metall-Ring auf den Becher und drücken Sie ihn nach unten. Stellen Sie alles komplett oben in dem Severo.



3 Schliessen Sie den Deckel, ist das Gerät eingeschaltet dann fängt es sofort an zu mörsern. Drücken Sie sonst auf die grauen Taste um den Mahlvorgang zu starten. Beim beenden des Mahlvorganges wird die Lampe grün aufleuchten. Bei Sondenernährung zweifach Mörsern.



4 Nach dem Mahlvorgang können Sie die Deckel öffnen und Becher mit Metall-Ring (Mahkopf) aus dem Mörser entnehmen. Kontrolliere auf visuellen Kontamination. Die SeveroRondel mit einem Finger festhalten im Becher.



5 Heben Sie den Metall-Ring vorsichtig an und überprüfen Sie auf Pülverrückstände. Schieben Sie den Rondel über den Becherrand damit Rückstände zu Lösen. Entsorgen Sie die Folie.



6 Der Metall-Ring ist sofort wieder verfügbar für weitere Einsatz. Das Pulver kann jetzt vermischt werden mit Apfelmus, Säften, Pudding oder ähnliches und eingenommen werden. (Severo Schluckgel ab Mei 2018)

Alles Erforderliche

• **SeveroCup** (nr. MED001)

Für den Einsatz beim Mörsern mit dem Severo empfehlen wir die folgende zusätzliche Artikel:

• **SeveroRondel** (nr. MED003)

Um den Schleifkopf sauber zu halten. Die Verwendung von Rondellen verhindert Kreuzkontamination und spart nach jedem Schleifzyklus Reinigungszeit.

• **SeveroCup Deckel** (nr. MED002)

Um den Becher vollständig abzudichten, werden auf diese Weise Verschüttungen und Verunreinigungen während der Lagerung und Medikamentenverteilung minimiert.

Reinigung

Beim visuellen Verschmutzung vom Mörserkopf dieser sauber machen mit einem Gazebinde und Alkohol. Beim visuellen Verschmutzung ist die ganze Maschine abwischtbar mit einem feuchten Tuch und eventuel Spülmittel.

Tip

Überprüfen Sie den SeveroCup und den SeveroRondel nach dem Schleifen immer auf Beschädigungen. Die Einwegartikel wurden ausgiebig mit den härtesten Medikamenten getestet. Unter extremen Bedingungen können Schäden jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Lebensdauer des Batteries wird verbessert wenn das Gerät ohne Netzspannung benutzt wird.

SAMARIT
safe patient moving & handling

Samarit Medical AG

Gewerbestrasse 12

CH-8132 Egg, Schweiz

Tel.: +41 44 918 10 11 Fax: +41 44 918 24 39

e-mail: info@samarit.com - www.samarit.com